


# Barres d'Appui en Acier Inoxidable

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

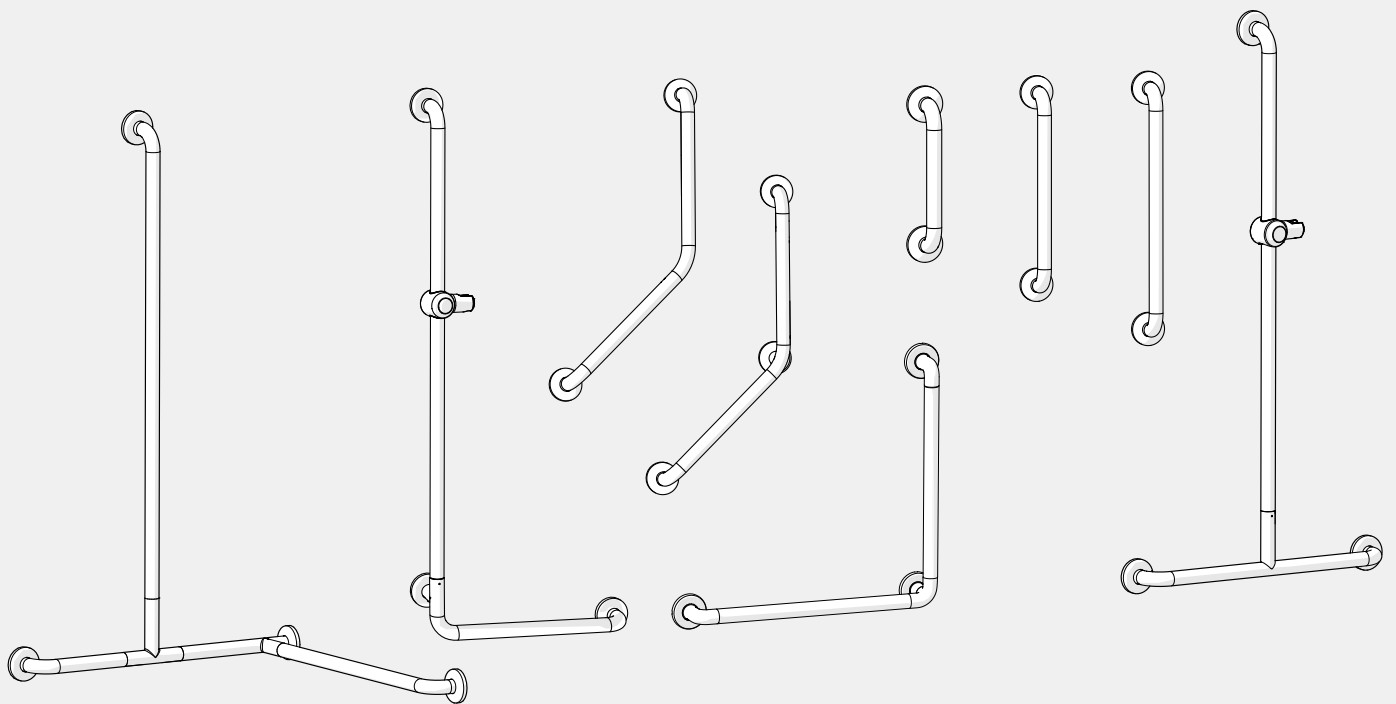


# Important Information & Installation

**L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions, et doit être réalisée par un installateur compétent.**

## Important





Avant de fixer quoi que ce soit aux murs, assurez-vous que la construction de ce type de mur est capable de supporter le poids maximal de l'unité chargée et que les fixations et accessoires appropriés sont utilisés pour ce type de mur. Les fixations murales ne sont pas fournies. Il est recommandé d'utiliser tous les trous de fixation du support. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.

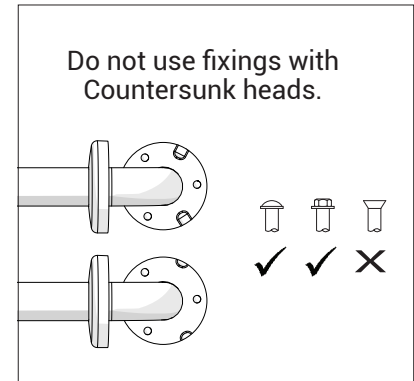

## Avant de commencer

Retirez toute enveloppe de protection et examinez attentivement le produit. Vérifiez que tous les éléments sont présents avant de jeter l'emballage. Veuillez informer immédiatement le détaillant de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation qui pourraient résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. Conservez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants et éliminez tous les emballages conformément aux autorités locales chargées du recyclage.

Pour les barres d'appui avec **deux supports** muraux, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

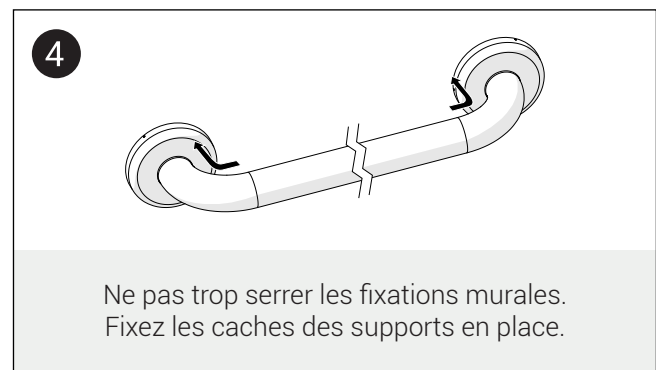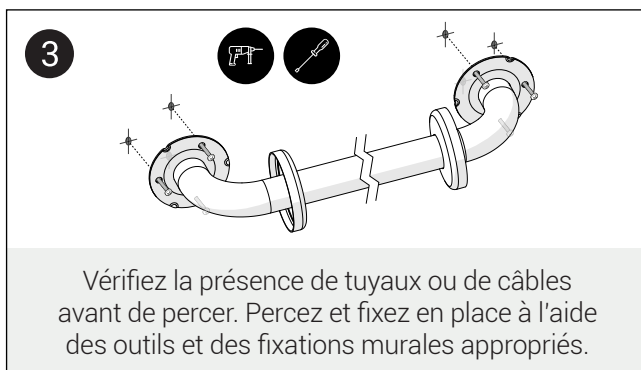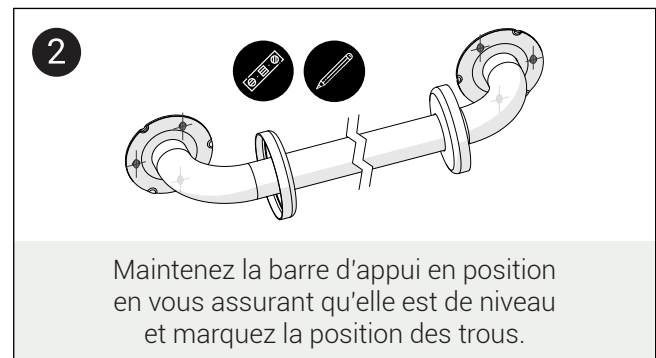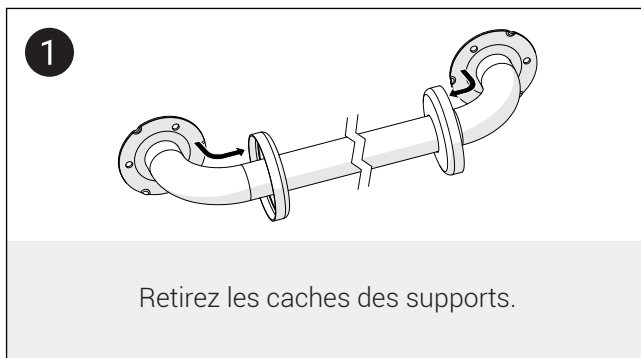

Pour les barres d'appui avec **trois supports muraux ou plus**, commencez par installer le(s) coude(s) du milieu vers l'extérieur, en veillant toujours à ce que la barre soit de niveau.

Produit	Diamètre	Longueur*	Hauteur**	Coloris	Référence
Barre Chromée 300mm	32mm	300mm	56mm	Acier inoxydable	01230
Barre Epoxy 300mm	32mm	300mm	56mm	Blanc Gris moyen Bleu foncé	01240WH 01240MG 01240DBB
Barre Chromée Poli 300mm	32mm	300mm	56mm	Acier inoxydable poli	01230
Barre Chromée 450mm	32mm	450mm	56mm	Acier inoxydable	01231
Barre Epoxy 450mm	32mm	450mm	56mm	Blanc Gris moyen Bleu foncé	01240WH 01240MG 01240DBB
Barre Chromée Poli 450mm	32mm	450mm	56mm	Acier inoxydable poli	01231
Barre Chromée 600mm	32mm	600mm	56mm	Acier inoxydable	01232
Barre Epoxy 600mm	32mm	600mm	56mm	Blanc Gris moyen Bleu foncé	01240WH 01240MG 01240DBB
Barre Chromée Poli 600mm	32mm	600mm	56mm	Acier inoxydable poli	01232
400x400mm Barre Epoxy (135°)	32mm	400x400	56mm	Blanc	01243WH
Barre d'Appui 1200x450mm (90°)	32mm	1200x450mm	56mm	Acier inoxydable poli Epoxy blanc	01244-HD 01244WH
Barre d'Appui 1200x300x300	32mm	1200x300x300	56mm	Acier inoxydable poli Epoxy blanc	01245-HD 01245WH
Barre Epoxy 1110x300x300	32mm	1110x300x300	56mm	Blanc	01246WH
Barre Chromée Option 2	32mm	1200x700x800	54mm	Acier inoxydable poli Epoxy blanc	01266 01266WH

\* Distance entre le centre des supports muraux. \*\* Distance entre le mur et la barre.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET INFORMATIONS SUR LES DONNÉES

### Poids maximal de la charge:

Droite & Coudée 23.6 stone (150kg)

T & L 15.7 stone (100kg)

La charge pondérale se réfère à la barre d'appui uniquement, appliquée pendant moins de 30 minutes sur une période de 60 minutes.

Les fixations et la rétention dans la surface de montage sont la responsabilité de l'installateur.

Plage de température de fonctionnement standard: -5°C à +35°C.

Matériaux de construction:

Brackets: Acier Inoxydable 304 | Bracket covers: Acier Inoxydable 304 | Rails: Acier Inoxydable 304

# Contactez-nous

**AKW**  
Life Made Better

## Renseignements généraux

0032 74 74 33 85

## Fax

0032 68 33 16 58

## Site Internet

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)

## Courriel et commandes

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

## AKW

29E Rue de la Terre à Brique  
7522 Marquain  
Belgique

## Suivez-nous:



## Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve de l'installation correcte unique du produit.

Ne s'applique pas à:

- Casses, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

## Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez les demandes de renseignements techniques d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signalera tout problème. Consultez les CGV sur notre site Internet ou notre catalogue pour plus d'informations. Aucun de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.