


Barres d'Appui en Epoxy

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

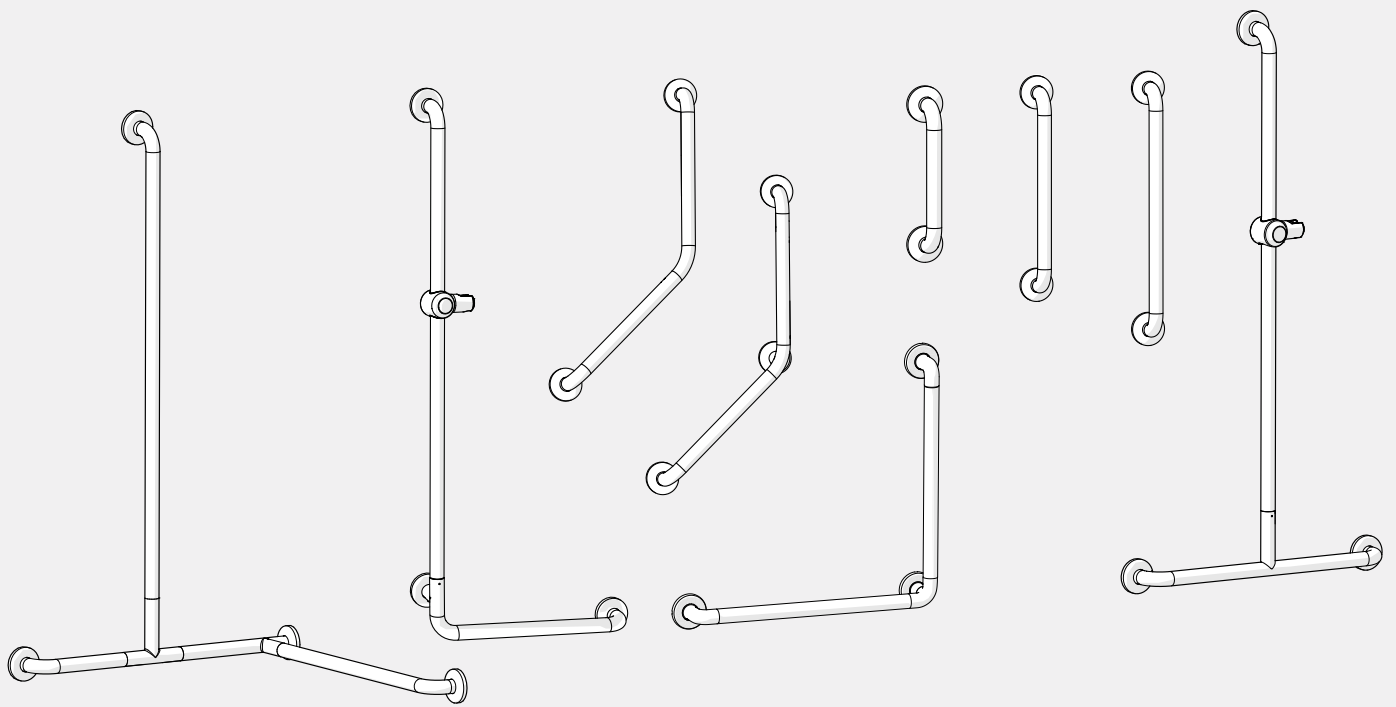


Important Information & Installation

L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions, et doit être réalisée par un installateur compétent.

Important





Avant de fixer quoi que ce soit aux murs, assurez-vous que la construction de ce type de mur est capable de supporter le poids maximal de l'unité chargée et que les fixations et accessoires appropriés sont utilisés pour ce type de mur. Les fixations murales ne sont pas fournies. Il est recommandé d'utiliser tous les trous de fixation du support. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.

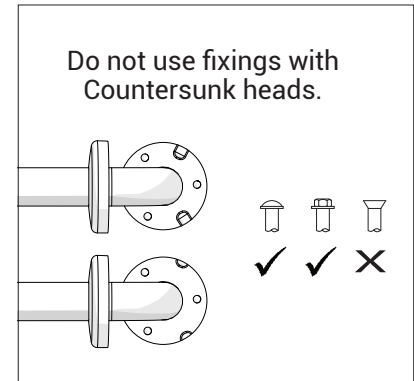

Avant de commencer

Retirez toute enveloppe de protection et examinez attentivement le produit. Vérifiez que tous les éléments sont présents avant de jeter l'emballage. Veuillez informer immédiatement le détaillant de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation qui pourraient résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. Conservez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants et éliminez tous les emballages conformément aux autorités locales chargées du recyclage.

Pour les barres d'appui avec **deux supports** muraux, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

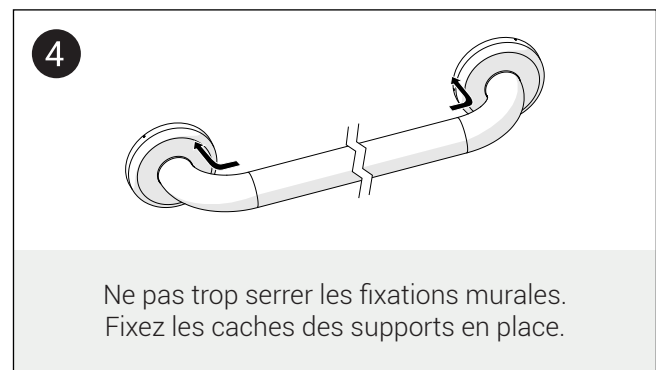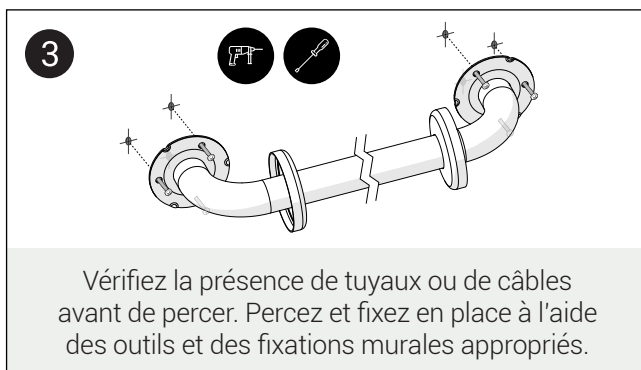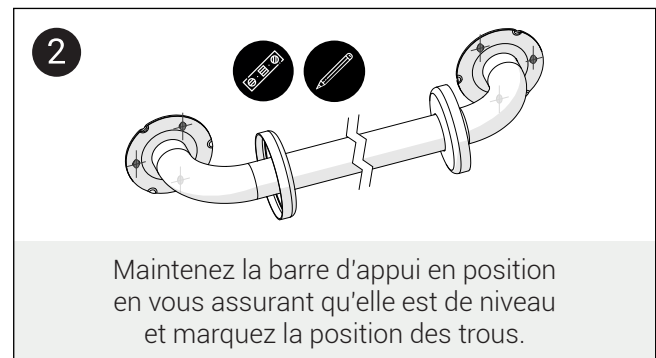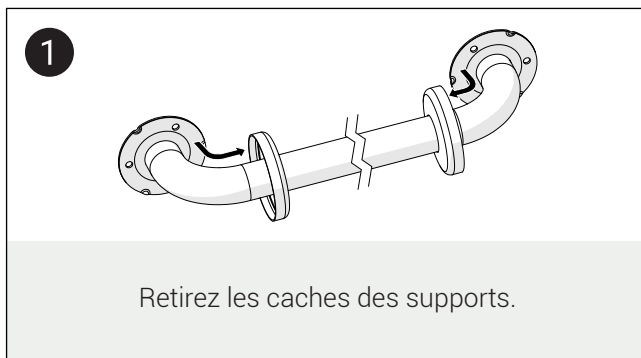

Pour les barres d'appui avec **trois supports muraux ou plus**, commencez par installer le(s) coude(s) du milieu vers l'extérieur, en veillant toujours à ce que la barre soit de niveau.

| Produit | Diamètre | Longueur* | Hauteur** | Coloris | Référence |
|--------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Barre Chromée 300mm | 32mm | 300mm | 56mm | Acier inoxydable | 01230 |
| Barre Epoxy 300mm | 32mm | 300mm | 56mm | Blanc Gris moyen Bleu foncé | 01240WH 01240MG 01240DBB |
| Barre Chromée Poli 300mm | 32mm | 300mm | 56mm | Acier inoxydable poli | 01230 |
| Barre Chromée 450mm | 32mm | 450mm | 56mm | Acier inoxydable | 01231 |
| Barre Epoxy 450mm | 32mm | 450mm | 56mm | Blanc Gris moyen Bleu foncé | 01240WH 01240MG 01240DBB |
| Barre Chromée Poli 450mm | 32mm | 450mm | 56mm | Acier inoxydable poli | 01231 |
| Barre Chromée 600mm | 32mm | 600mm | 56mm | Acier inoxydable | 01232 |
| Barre Epoxy 600mm | 32mm | 600mm | 56mm | Blanc Gris moyen Bleu foncé | 01240WH 01240MG 01240DBB |
| Barre Chromée Poli 600mm | 32mm | 600mm | 56mm | Acier inoxydable poli | 01232 |
| 400x400mm Barre Epoxy (135°) | 32mm | 400x400 | 56mm | Blanc | 01243WH |
| Barre d'Appui 1200x450mm (90°) | 32mm | 1200x450mm | 56mm | Acier inoxydable poli Epoxy blanc | 01244-HD 01244WH |
| Barre d'Appui 1200x300x300 | 32mm | 1200x300x300 | 56mm | Acier inoxydable poli Epoxy blanc | 01245-HD 01245WH |
| Barre Epoxy 1110x300x300 | 32mm | 1110x300x300 | 56mm | Blanc | 01246WH |
| Barre Chromée Option 2 | 32mm | 1200x700x800 | 54mm | Acier inoxydable poli Epoxy blanc | 01266 01266WH |

* Distance entre le centre des supports muraux. ** Distance entre le mur et la barre.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET INFORMATIONS SUR LES DONNÉES

Poids maximal de la charge:

Droite & Coudée 23.6 stone (150kg)

T & L 15.7 stone (100kg)

La charge pondérale se réfère à la barre d'appui uniquement, appliquée pendant moins de 30 minutes sur une période de 60 minutes.

Les fixations et la rétention dans la surface de montage sont la responsabilité de l'installateur.

Plage de température de fonctionnement standard: -5°C à +35°C.

Matériaux de construction:

Brackets: Acier Inoxydable 304 | Bracket covers: Acier Inoxydable 304 | Rails: Acier Inoxydable 304

Contactez-nous

AKW
Life Made Better

Renseignements généraux

0032 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:



Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve de l'installation correcte unique du produit.

Ne s'applique pas à:

- Casses, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez les demandes de renseignements techniques d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signalera tout problème. Consultez les CGV sur notre site Internet ou notre catalogue pour plus d'informations. Aucun de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.